	<b>MODE OPERATOIRE</b>		<b>MO ENS ENT 014 V1</b>	
	<b>ENTRETIEN DES SONDES D'ECHOGRAPHIE EN CONSULTATION D'OPHTALMOLOGIE</b>		2010	1/2

## OBJET

Nettoyage/Désinfection des sondes d'échographies ophtalmiques afin d'assurer au patient un soin de qualité et de respecter l'intégrité du matériel.

## DOMAINE D'APPLICATION

Service de consultations d'ophtalmologie

## PERSONNEL CONCERNE

Ophtalmologue, infirmier d'ophtalmologie

## REFERENCES

### *Références législatives, réglementaires et normatives*

Décret n°97-311 du 7 avril 1997 relatif à la démarche d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins délivrés aux patients

Hygiène et prise en charge des dispositifs médicaux en consultation d'ophtalmologie, CCLIN Paris-Nord, septembre 2000

Prévention des infections nosocomiales en ophtalmologie, CCLIN Ouest, 5 juin 2002

Décret de compétence n° 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier


Traitement des dispositifs médicaux en ophtalmologie et contactologie, Ministère de la santé, DHOS/DGS, CTINILS, novembre 2005

### *Références internes*

Mode opératoire relatif à l'hygiène des mains : MO SPI-PRE 036

Procédure d'élimination des déchets : PG ENS-ENT 004

Rédaction (nom et fonction)	Date Visa	Vérification (nom et fonction)	Date Visa	Approbation support (nom et fonction)	Date Visa
P. ROBBE : IDE M. DUHAMEL : cadre hygiéniste V. LEFEBVRE : IDEH		M. CAILLAUX : Président CLIN S. ALFANDARI : praticien hygiéniste M. ICHALALEN : ophtalmologue		RM BONFANTE Directrice Qualité	

QUI	fait	et	COMMENT
<p>Médecin IDE</p>	<p style="text-align: center;"><b>ENTRETIEN DE L'ECHOGRAPHE</b></p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Pratiquer l'hygiène des mains</p> <p style="text-align: center;">↙ ↘</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p><b>Clavier</b></p> <p>↓</p> <p>Nettoyer/Désinfecter le clavier avec une lingette</p> <p>↓</p> <p>Eliminer les déchets</p> <p>↓</p> <p>Pratiquer l'hygiène des mains</p> <p>↓</p> <p><b>ECHOGRAPHE PRET A L'EMPLOI</b></p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>Sonde</b></p> <p>↓</p> <p>Eliminer le gel</p> <p>↓</p> <p>Nettoyer/Désinfecter la sonde avec une lingette</p> <p>↓</p> <p> Respecter temps de contact</p> <p>↓</p> <p>Rincer au sérum physiologique</p> <p>↓</p> <p>Eliminer les déchets</p> <p>↓</p> <p>Pratiquer l'hygiène des mains</p> <p>↓</p> <p><b>ECHOGRAPHE PRET A L'EMPLOI</b></p> </div> </div>		