



MODE OPÉRATOIRE
**ENTREtenir LA SONDE D'ECHOGRAPHIE
TRANSOESOPHAGIENNE**

MO ENDO 004 v5

Date :
09/2017

Page :
1/3

MODIFICATIONS APPORTÉES

- Mise en place des lingettes Tristel Trio® pour l'entretien

OBJET

Ce mode opératoire décrit les modalités d'entretien de la sonde d'échographie transoesophagienne.

DOMAINE D'APPLICATION

Service de consultations cardiologiques

PERSONNEL CONCERNÉ

IDE, Médecin

RÉFÉRENCES

Références législatives, réglementaires et normatives

Circulaire DGS/5C/DHOS/E2/2001/138 du 14 mars 2001 relative aux précautions à observer lors de soins en vue de réduire les risques de transmission d'agents transmissibles non conventionnels

Circulaire DHOS/E2/DGS/SD5C/N°591 du 17 décembre 2003 relative aux modalités de traitement manuel pour la désinfection des endoscopes non autoclavables dans les lieux de soins

Décret de compétence n°2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier

Instruction DGS/RI3/2011/449 du 1er décembre 2011 relative à l'actualisation des recommandations visant à réduire les risques de transmission d'agents transmissibles non conventionnels lors des actes invasifs

Références internes

Mode opératoire « Hygiène des mains » (EN INF 006)

Enregistrement « Bon usage des produits d'entretien dans les services de soins » (EN INF 004)

Procédure « Elimination des déchets d'activité de soins » (PG INF 020)

LISTE DES ANNEXES

a1 : cahier de traçabilité de l'entretien de la sonde d'échographie transoesophagienne, modèle 2197

MOTS CLÉS


Endoscopes, cardiologie, ETO

DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS

ETO : Echographie Transoesophagienne

MCJ : Maladie de Kreutzfeld Jacob

Rédaction (nom et fonction)	Visa	Vérification (nom et fonction)	Visa	Approbation support (nom et fonction)	Visa
V. LEFEBVRE – IDE – UHLIN		P. PATOZ – Président du CLIN		E VERWAERDE – Ingénieur qualité – Direction Qualité	
M. DUHAMEL – CS – UHLIN		Dr E. DECOULX – Chef de service – Cardiologie			
S.LYS – CS – Cardiologie		Dr S. ALFANDARI – PH – UHLIN			

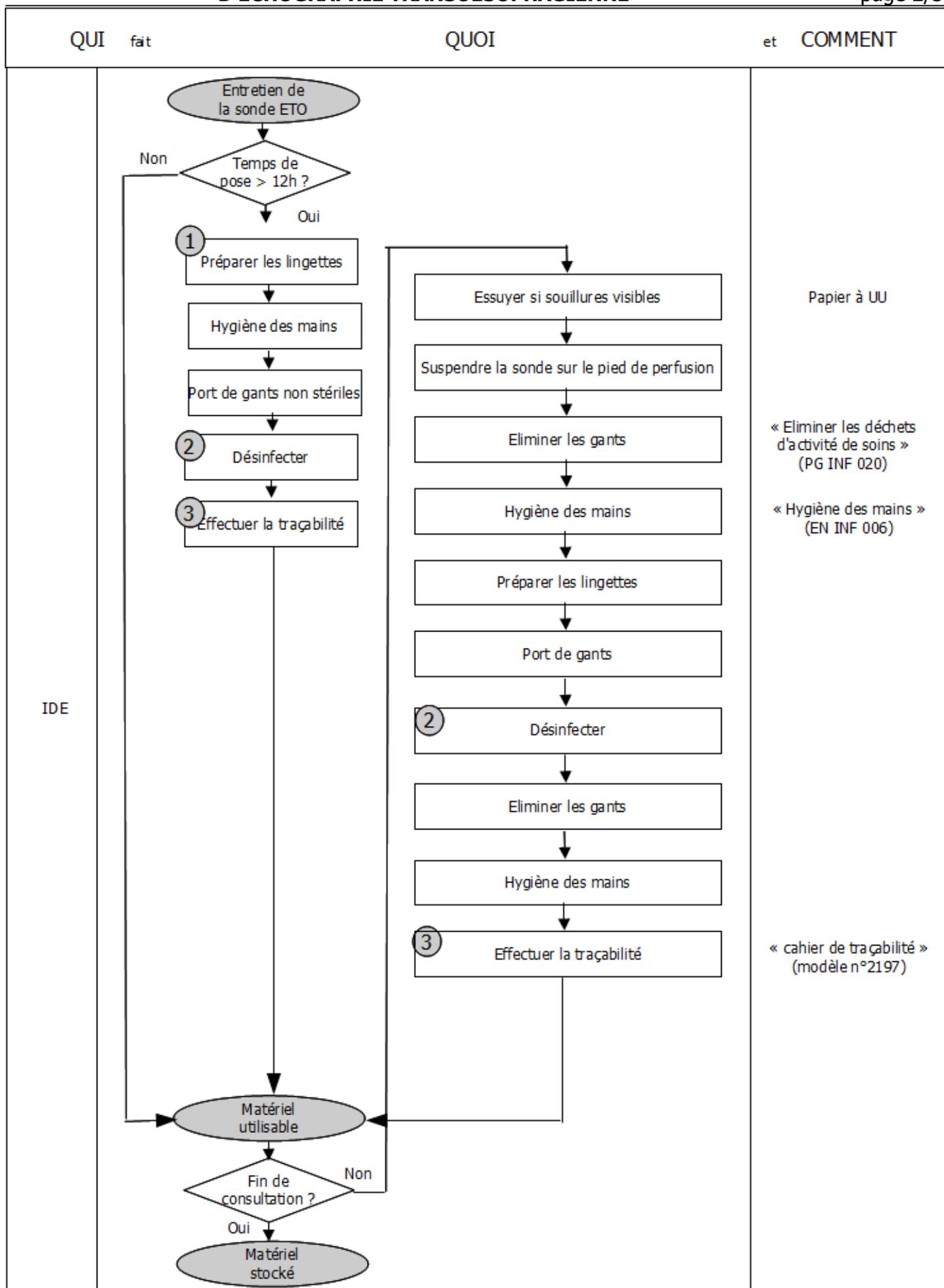

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Avant toute échographie, il est impératif de tracer le statut MCJ du patient sur les documents existants.
En cas de patient suspect ou atteint, pas d'ETO.

1- PREPARER LES LINGETTES

Ouvrir les sachets de lingettes :

- pré-nettoyante,
- désinfectante
- rinçage

Préparer le flacon de mousse activatrice

2- DESINFECTER

- Prendre la lingette pré-nettoyante
- Essuyer la sonde du propre vers le sale (commencer par la poignée)
- Eliminer la lingette dans le gant

- Port de gants non stériles
- Prendre la lingette sporicide dans le creux de la main
- Appliquer 2 doses de mousse activatrice
- Froisser la lingette pendant 15 secondes pour générer le dioxyde de chlore
- Essuyer la sonde du propre vers le sale (commencer par la poignée)



S'assurer que toute la surface de la sonde entre en contact avec la lingette
Respecter le temps de contact de 30 secondes

- Eliminer la lingette dans le gant

- Port de gants non stériles
- Prendre la lingette de rinçage
- Essuyer la sonde
- Eliminer la lingette

3- EFFECTUER LA TRACABILITE

Sur le cahier de traçabilité :

- Reporter le code de chaque sachet
- Coller 1 des 2 étiquettes du sachet de désinfection (l'autre étiquette est réservée au dossier patient)
- Inscrire le numéro de lot du flacon de mousse activatrice