	MODE OPERATOIRE ENTRETIEN DU MATERIEL THERMOSENSIBLE EN OPHTALMOLOGIE	MO SPI - PRE 007 v1	
		Date 06/2001	n° page 1/3

OBJET

Décontamination et désinfection du matériel :

- verres à 3 miroirs pour biomicroscope
- verres à gonioscopie
- verres utilisés pour le traitement laser
- verre d'Abraham pour iridotomie et capsulotomie
- verre grand champ
- Tonomètre à aplanation

DOMAINE D'APPLICATION

Service de consultation d'ophtalmologie

PERSONNEL CONCERNE

IDE

REFERENCES

Références législatives, réglementaires et normatives

- Décret 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier
- Circulaire DGS/DH n°100 du 11 décembre 1995 relative aux précautions à observer en milieu chirurgical et anatomopathologique face aux risques de transmission de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, modifiée
- Circulaire DGS/DH n°236 du 2 avril 1996 relatives aux modalités de désinfection des endoscopes dans les lieux de soins, modifiée
- Circulaire DGS/5C/DHOS/E2/2001/138 du 14 mars 2001 relative aux précautions à observer lors de soins en vue de réduire les risques de transmission d'agents transmissibles non conventionnels

Références internes

- Protocole N°4 relatif à l'élimination des déchets

Liste des annexes

Annexe 1 : choix de la procédure du matériel thermosensible en consultation d'ophtalmologie

Annexe 2 : grille d'évaluation de la procédure





DEFINITIONS ET ABREVIATIONS

NA

INDICATEURS

Pourcentage de grilles d'évaluation correctes

Rédaction (nom et fonction)	Date Visa	Vérification (nom et fonction)	Date Visa	Approbation support (nom et fonction)	Date Visa
UHLIN	06/2001	CLIN :	18/06/02	L. Codron : Adjoint qualité	

QUI	fait	QUOI	et	COMMENT
IDE		<p style="text-align: center;">Entretien le matériel d'ophtalmologie</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>1 Préparer les produits</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>2 Vérifier le matériel</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>3 Appliquer les recommandations</p>		
IDE		<p style="text-align: center;">Rincer</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>4 Immerger et nettoyer</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Rincer</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>5 Désinfection à froid</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Rincer</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Sécher</p>	<p>←</p>	<p> eau filtrée</p> <p> 2 min. à eau filtrée</p> <p> 5 min. à eau filtrée</p> <p> papier à usage unique ou tissu non pelucheux</p>
IDE		<p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Fin de consultation</p> <p style="text-align: center;">Non</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">oui</p>		
IDE		<p style="text-align: center;">Stockage du matériel et élimination du désinfectant</p>		

1- PREPARER LES PRODUITS

1/ Détergent/décontaminant alcalin

SALVANIOS pH 10®

Dilué à 0,50 % soit une pression de 25 ml pour 4 litres d'eau

Activité bactéricide, fongicide, virucide

Temps de trempage : 15 minutes

2/ Désinfectant à froid

ANIOXYDE 1000® : flacon de 45 ml d'activateur + flacon de 5 litres de générateur

Verser le flacon de 45 ml d'activateur dans le flacon de 5 litres de générateur

Attendre 30 minutes pour qu'il soit prêt à l'emploi et vérifier la stabilité par la bandelette.

En 15 minutes : activité bactéricide, virucide, fongicide, tuberculocide

En 30 minutes : activité sporicide

Vérifier l'efficacité de la solution à l'aide de bandelette réactive

Les actions suivantes conditionnent la réussite des étapes ultérieures :

Action physico-chimique : élimination des souillures minérales et organiques

Action mécanique : brossage

Action antimicrobienne

2- VERIFIER LE MATERIEL

1/ Filtranios compact pour filtration de l'eau du réseau

membrane de filtration à 0.2 µm, autoclavable

ne pas dépasser le nombre de cycles de stérilisation

2/ Essuyage à usage unique non pelucheux

3- APPLIQUER LES RECOMMANDATIONS

- 👉 Toute manipulation est protégée par le port de gants
- 👉 Port de surblouse, masque à visière ou lunettes si risque de projections
- 👉 Changer le bain de détergent/désinfectant et l'eau de rinçage entre chaque séquence de détergence
- 👉 Changer le bain d'acide peracétique tous les jours en fin de consultation
- 👉 Respecter temps de contact et dilutions
- 👉 Nettoyer et désinfecter le matériel au détergent/désinfectant après chaque utilisation
- 👉 Changer le *filtranios* tous les jours

4- IMMERGER ET NETTOYER

Immerger et nettoyer immédiatement et complètement le matériel dans le bac de SALVANIOS pH 10®

Temps de contact : 15 minutes

5- DESINFECTION A FROID

Immerger le matériel dans l'ANIOXYDE 1000®.

Temps de contact : 15 minutes minimum, 30 minutes pour la sporicidie sur prescription médicale.

Choix de la procédure du matériel thermosensible en consultation d'ophtalmologie

Cas I	Cas II	Cas III
<p data-bbox="241 491 591 528">■ Patient non à risque</p> <p data-bbox="331 671 501 708">Nettoyage</p> <p data-bbox="152 804 680 841">Désinfection à l'acide péracétique</p>	<p data-bbox="786 491 1301 612">■ Patient à risque : antécédents d'hormone de croissance, antécédents familiaux</p> <p data-bbox="904 671 1182 708">Double nettoyage</p> <p data-bbox="779 804 1308 841">Désinfection à l'acide péracétique</p> <p data-bbox="824 1075 1263 1155">Elimination systématique du désinfectant</p>	<p data-bbox="1375 491 1957 528">■ Patient atteint ou suspect de MCJ</p> <p data-bbox="1532 671 1809 708">Double nettoyage</p> <p data-bbox="1413 756 1921 793">Mise sous séquestre du matériel</p> <p data-bbox="1368 852 1966 932">Aspiration et élimination en DASRI du liquide de lavage sinon neutralisation</p> <p data-bbox="1429 984 1912 1064">Nettoyage et neutralisation du matériel</p> <p data-bbox="1361 1123 1973 1160">Cas confirmé : destruction du matériel</p> <p data-bbox="1420 1212 1921 1292">Cas non confirmé : reprendre la procédure Cas I</p>

<h2 style="margin: 0;">GRILLE D'ÉVALUATION DE L'ENTRETIEN DU MATÉRIEL D'OPHTALMOLOGIE</h2>
--

Service

Date

Heure

Geste réalisé par :

Situations	Oui	Non	Observations
Tenue conforme			
Le bain de détergent désinfectant est changé entre chaque examen			
Le bain de désinfectant est changé tous les jours			
Le matériel est rincé immédiatement après usage			
Le matériel est immergé 15 minutes dans le détergent désinfectant			
Le matériel est rincé 2 minutes à l'eau filtrée			
Le matériel trempe dans le désinfectant - 15 minutes - 30 minutes			
Le matériel est rincé 5 minutes à l'eau filtrée			
Le matériel est essuyé			