


| | | | |
|---|--|----------------------------|----------------|
|  | MODE OPERATOIRE ENTRETIEN DU NASOFIBROSCOPE | MO SPI – PRE 028 v3 | |
| | | Date 05/2006 | n° page 1/7 |

OBJET

Décontamination, Détergence et désinfection du matériel d'endoscopie ORL

DOMAINE D'APPLICATION

Service de consultations d'ORL

PERSONNEL CONCERNE

IDE, médecins

REFERENCES

Références législatives, réglementaires et normatives

Circulaire DGS/DH n°100 du 11 décembre 1995 relative aux précautions à observer en milieu chirurgical et anatomopathologique face aux risques de transmission de la maladie de Creutzfeldt-Jakob

Circulaire DGS/5C/DHOS/E2/2001/138 du 14 mars 2001 relative aux précautions à observer lors de soins en vue de réduire les risques de transmission d'agents transmissibles non conventionnels

Décret de compétence n° 2002-194 du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier

Circulaire DHOS/E2/DGS/SD5C/N°591 du 17 décembre 2003 relative aux modalités de traitement manuel pour la désinfection des endoscopes non autoclavables dans les lieux de soins.

Circulaire N°DGS/SD5C/DHOS/2005/435 du 23 septembre 2005 relative aux recommandations pour le traitement des dispositifs médicaux utilisés chez les sujets ayant reçu des produits sanguins labiles (PSL) provenant de donneurs rétrospectivement atteints de variant de la maladie de Creutzfeldt Jacob (vMCJ).

Références internes

Procédure MO SPI – PRE 001 V2 relative à l'adaptation du filtre terminal

Protocole N°4 relatif à l'élimination des déchets

Liste des annexes

Annexe 1 : grille d'évaluation de la procédure

Annexe 2 : fiche de traçabilité


DEFINITIONS ET ABREVIATIONS


NA

INDICATEURS

Pourcentage de grilles d'évaluation correctes

| Rédaction (nom et fonction) | Date Visa | Vérification (nom et fonction) | Date Visa | Approbation support (nom et fonction) | Date Visa |
|------------------------------------|--------------|--|--------------|--|--------------|
| S. BOHEE, IDE V. LEFEBVRE, IDEH | 05/2006 | M. CAILLAUX, Présidente du CLIN M. DUHAMEL : Cadre hygiéniste | 20/06/06 | L. CODRON: Bureau Qualité | |

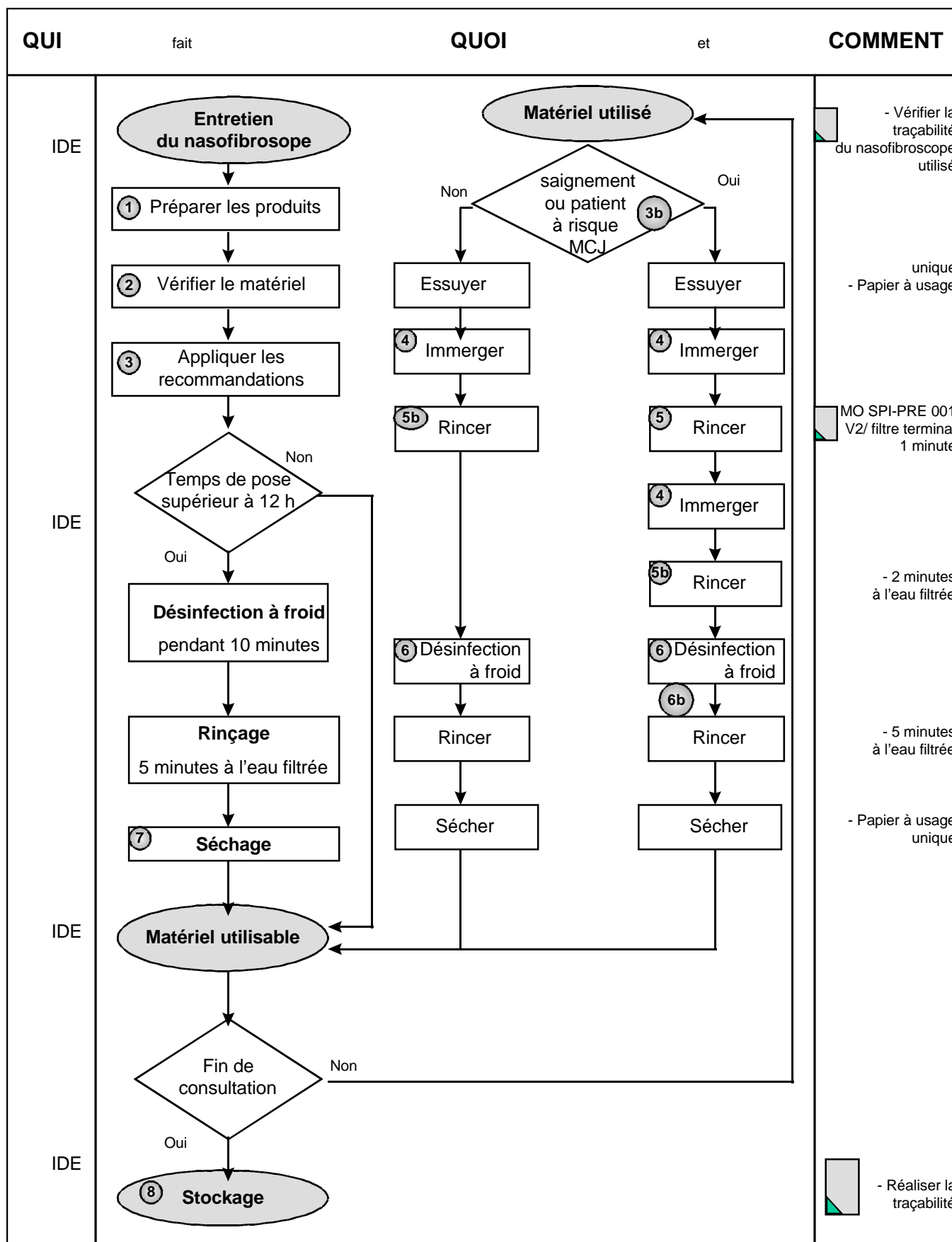

| | | | |
|---|--|----------------------------|----------------|
|  | MODE OPERATOIRE ENTRETIEN DU NASOFIBROSCOPE | MO SPI – PRE 028 v3 | |
| | | Date 05/2006 | n° page 3/7 |

1- PREPARER LES PRODUITS

1/ Détergent/décontaminant

SALVANIOS pH 7®

Dilué à 0,50 % soit une pression pour 4 litres d'eau

Activités bactéricide, fongicide, virucide

Temps de trempage :

- ☐ 15 minutes **en l'absence de saignement**
- ☐ 10 minutes pour le premier et 5 minutes pour le second **en cas de saignement**

2/ Désinfectant à froid

ANIOXYDE 1000® : flacon de 45 ml d'activateur + flacon de 5 litres de générateur

Verser le flacon de 45 ml d'activateur dans le flacon de 5 litres de générateur

Attendre 15 minutes pour qu'il soit prêt à l'emploi (valider par la bandelette)

En 15 minutes : activités bactéricide, virucide, fongicide, tuberculocide

En 30 minutes l'activité sporicide

Les actions suivantes conditionnent la réussite des étapes ultérieures :

Action physico-chimique : élimination des souillures minérales et organiques

Action mécanique : brossage

Action antimicrobienne

2- MATERIEL

1/ Filtranios compact

membrane de filtration à 0.2 µm, autoclavable

ne pas dépasser le nombre de cycles de stérilisation

2/ Bacs de trempage

1 bac pour le SALVANIOS pH 7®

1 bac pour l'ANIOXYDE 1000®

3/ Divers


Essuyage à usage unique

Gaine de protection, (pour le PENTAX® adulte) assurant ainsi l'absence de contact avec les sécrétions et permettant un seul nettoyage, pour les patients à risque

3- RECOMMANDATIONS


- ☞ Toute manipulation est protégée par le port de gants
- ☞ Port de surblouse, masque à visière ou lunettes
- ☞ Changer le bain de détergent/désinfectant et l'eau de rinçage entre chaque endoscopie

| Rédaction (nom et fonction) | Date Visa | Vérification (nom et fonction) | Date Visa | Approbation support (nom et fonction) | Date Visa |
|------------------------------------|--------------|--|--------------|--|--------------|
| S. BOHEE, IDE V. LEFEBVRE, IDEH | 05/2006 | M. CAILLAUX, Présidente du CLIN M. DUHAMEL : Cadre hygiéniste | 20/06/06 | L. CODRON: Bureau Qualité | |

| | | | |
|---|--|----------------------------|----------------|
|  | MODE OPERATOIRE ENTRETIEN DU NASOFIBROSCOPE | MO SPI – PRE 028 v3 | |
| | | Date 05/2006 | n° page 4/7 |

- ☞ Changer le bain d'acide peracétique tous les 7 jours (soit le lundi matin) ou après trempage de 50 nasofibrosopes maximum, si le test à la bandelette est validé
- ☞ Vérifier la concentration du bain d'acide peracétique à la bandelette en début de séance puis toutes les 4 heures en cas d'activité continue
- ☞ Respecter temps de contact et dilutions
- ☞ Nettoyer et désinfecter les bacs et surfaces au détergent/désinfectant après chaque séance
- ☞ Ne jamais mettre la sonde non emballée dans la valise de transport munie de mousse
- ☞ Rincer et sécher
- ☞ Changer le filtre terminal tous les jours

| Rédaction (nom et fonction) | Date Visa | Vérification (nom et fonction) | Date Visa | Approbation support (nom et fonction) | Date Visa |
|------------------------------------|--------------|--|--------------|--|--------------|
| S. BOHEE, IDE V. LEFEBVRE, IDEH | 05/2006 | M. CAILLAUX, Présidente du CLIN M. DUHAMEL : Cadre hygiéniste | 20/06/06 | L. CODRON: Bureau Qualité | |

| | | | |
|---|--|----------------------------|----------------|
|  | MODE OPERATOIRE ENTRETIEN DU NASOFIBROSCOPE | MO SPI – PRE 028 v3 | |
| | | Date 05/2006 | n° page 5/7 |

3 BIS PATIENT A RISQUE MCJ

Patient ayant signalé avoir reçu des produits sanguins labiles provenant de donneurs rétrospectivement atteints de MCJ.

4- IMMERGER

Immerger immédiatement et complètement l'appareil dans le bac de SALVANIOS pH 7®

Temps de contact

- ☐ 15 minutes **en l'absence de saignement**
- ☐ 10 minutes pour le premier et 5 minutes pour le second **en cas de saignement**

ATTENTION AU TYPE D'APPAREIL POUR L'IMMERSION

Frotter la poignée avec une chiffonnette imprégnée de SALVANIOS pH 7® si non immergeable

5 ET 5 BIS- RINCER

Rinçage à l'eau filtrée

- ☐ 2 minutes **en l'absence de saignement**
- ☐ 1 minute pour le premier et 2 minutes pour le second

6 ET 6 BIS DESINFECTION A FROID

Immerger l'endoscope dans l'ANIOXYDE 1000®, sauf la poignée si elle n'est pas immergeable.
Temps de contact : 15 minutes minimum, 30 minutes sur prescription médicale.

Eliminer le bain de désinfectant pour un patient à risque MCJ


7- SÉCHAGE

L'extérieur de l'appareil avec du papier à usage unique, jusqu'à séchage complet

8- STOCKAGE

Dans l'armoire prévue à cet effet

| Rédaction (nom et fonction) | Date Visa | Vérification (nom et fonction) | Date Visa | Approbation support (nom et fonction) | Date Visa |
|------------------------------------|--------------|--|--------------|--|--------------|
| S. BOHEE, IDE V. LEFEBVRE, IDEH | 05/2006 | M. CAILLAUX, Présidente du CLIN M. DUHAMEL : Cadre hygiéniste | 20/06/06 | L. CODRON: Bureau Qualité | |

| | | | |
|---|--|----------------------------|----------------|
|  | MODE OPERATOIRE ENTRETIEN DU NASOFIBROSCOPE | MO SPI – PRE 028 v3 | |
| | | Date 05/2006 | n° page 6/7 |

Annexe 1

GRILLE D’EVALUATION DE L’ENTRETIEN DU NASOFIBROSCOPE

Service Date Heure N° de l’appareil

Geste réalisé par :

| Situations | Oui | Non | Observations |
|--|-----|-----|--------------|
| L’appareil est immobilisé depuis plus de 12 heures - trempage 10 minutes dans le bain de désinfectant | | | |
| Le bain de détergent désinfectant est changé entre chaque examen | | | |
| Le bain de désinfectant est changé tous les 7 jours | | | |
| La concentration du bain de désinfectant est vérifiée | | | |
| L’appareil est essuyé immédiatement après usage | | | |
| L’appareil est immergé 15 minutes dans le détergent désinfectant | | | |
| L’appareil est rincé 2 minutes à l’eau filtrée | | | |
| L’appareil trempe dans le désinfectant - 15 minutes - 30 minutes | | | |
| L’appareil est rincé 5 minutes à l’eau filtrée | | | |
| L’appareil est essuyé avec un essuyage à usage unique | | | |
| La traçabilité est réalisée | | | |

| Rédaction (nom et fonction) | Date Visa | Vérification (nom et fonction) | Date Visa | Approbation support (nom et fonction) | Date Visa |
|------------------------------------|--------------|--|--------------|--|--------------|
| S. BOHEE, IDE V. LEFEBVRE, IDEH | 05/2006 | M. CAILLAUX, Présidente du CLIN M. DUHAMEL : Cadre hygiéniste | 20/06/06 | L. CODRON: Bureau Qualité | |

Date :/...../.....

ENDOSCOPIE ORL - TRACABILITE

FILTRE « ANIOS » POSÉ LE.....PAR.....

En début de programme :

Désinfection de l'endoscope : fait

Nom de l'I.D.E. :

| Nom, prénom, date de naissance du patient ou Etiquette | Nom du médecin | Etapes de la désinfection des endoscopes | Visas du médecin et de l'infirmière |
|--|----------------|---|-------------------------------------|
| | | Détergence - décontamination <input type="checkbox"/> 15 min. Rinçage à l'eau filtrée <input type="checkbox"/> 2 min. Désinfection <input type="checkbox"/> 15 min. <input type="checkbox"/> 30 min. Rinçage à l'eau filtrée <input type="checkbox"/> 5 min. | |

UHLIN Novembre 2000