	MODE OPERATOIRE NETTOYAGE DES PULSAR DU BLOC OPHTALMO	MO CMT – STE 5 05 v1	
		Date 11/2007	n° page 1/3

OBJET

Débarrasser le matériel décontaminé des souillures dont il est porteur avant son acheminement en zone de conditionnement.

Le lavage a pour but de diminuer le risque de persistance de germes avant la stérilisation du matériel. Eviter l'apparition d'un biofilm dans les canaux et canules des Pulsar.

DOMAINE D'APPLICATION

Les Pulsar provenant du bloc opératoire et devant être stérilisés.
Les Pulsar neufs et en prêt.

PERSONNEL CONCERNE

IBODE
Personnel de stérilisation.

REFERENCES

Circulaire N° DGS/5C/DHOS/E2/2001/138 du 14 mars 2001 relative aux précautions à observer lors de soins en vue de réduire les risques de transmission d'agents transmissibles non conventionnels.

Lignes directrices particulières N°1

Fiche technique des produits détergents désinfectants utilisés dans l'établissement.


Les bonnes pratiques de stérilisation

DEFINITIONS ET ABREVIATIONS



D D : Détergent – Désinfectant

IBODE : Infirmier(e) de Bloc Opératoire Diplômé(e) d'Etat

Rédaction (<i>nom et fonction</i>)	Date Visa	Vérification (<i>nom et fonction</i>)	Date Visa	Approbation support (<i>nom et fonction</i>)	Date Visa
M. DUHAMEL, cadre hygiéniste L. DUBRULLE, IDE stérilisation D. BREFORT, cadre de blocs	11/2007	E. MOQUAY, pharmacien S. ALFANDARI, praticien hygiéniste	11/2007	O. MUNSCH : directeur qualité	11/2007

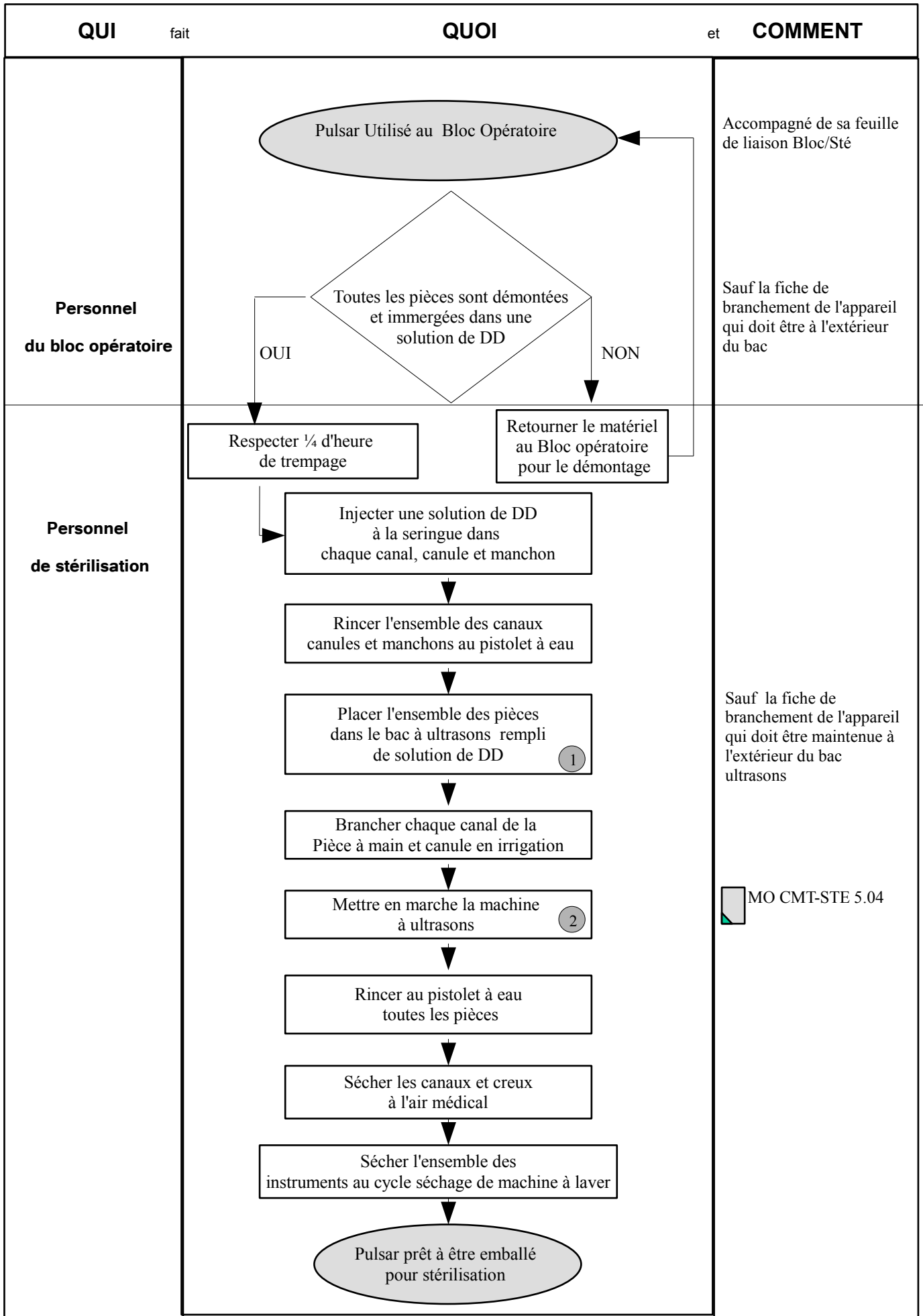

1 -PLACER LES PIECES DANS LE PANIER DE LA MACHINE A ULTRASONS

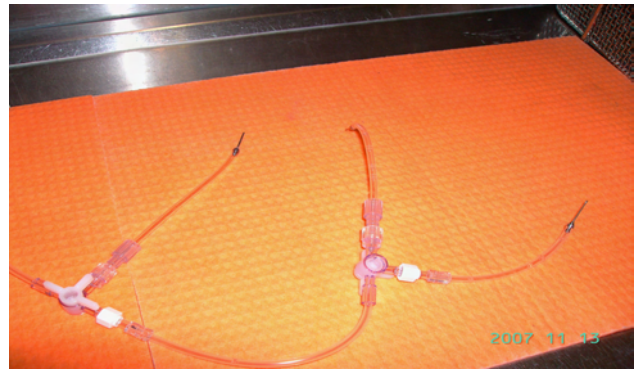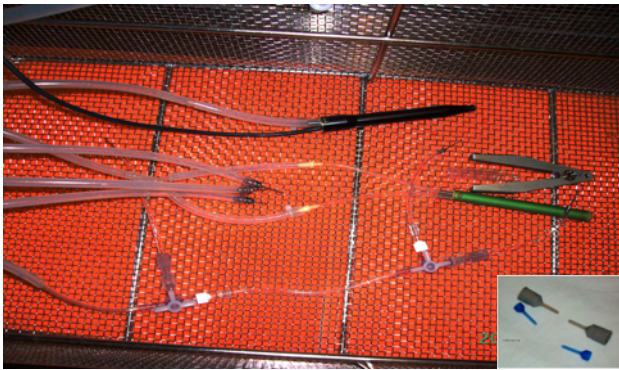


Toutes les pièces creuses doivent être branchées en irrigation



La fiche de branchement du Pulsar est maintenue à l'extérieur du bac

2 -METTRE EN MARCHÉ LA MACHINE A ULTRASONS

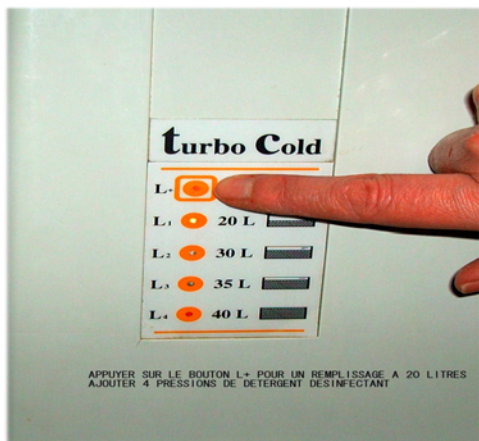


Remplissage 20L d'eau et 4 pressions de détergent désinfectant



Programmation : 20'



Mise en marche en mode Ultrasons

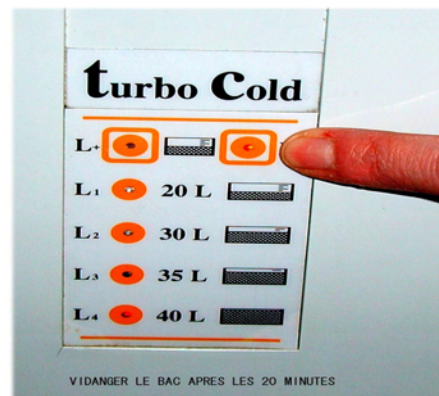

Vidange du bac